

COLDISEPT

NANO SILVER

Nosní sprej

CZ



NÁVOD K POUŽITÍ

Zdravotnický prostředek ve formě spreje potlačuje pocit suché a podrážděné nosní sliznice a chrání ji před škodlivými zevními faktory.

COLDISEPT nanoSILVER nosní sprej zvlhčuje a zklidňuje nosní sliznici, podporuje její regeneraci a potlačuje pocit pálení.

Přípravek obsahuje stříbrné nanočástice, které omezují růst bakterií. Přípravek vytváří gelovou vrstvu, která chrání před bakteriemi a viry a podporuje regeneraci nosní sliznice.

Vlastnosti přípravku jsou výsledkem působení minerálních solí a rostlinného extraktu.

SLOŽENÍ

Čištěná voda, nanokoloid stříbra, extrakt z *Chondrus crispus* (puchratka kadeřavá), sorbitol, glycerin, minerální soli (dihydrogenfosforečnan draselný, chlorid draselný, chlorid sodný, hexahydrát chloridu vápenatého, hexahydrát chloridu hořečnatého), benzoan sodný, kyselina citronová.

INDIKACE

Veškeré případy suché a podrážděné nosní sliznice, bez ohledu na příčinu.

Použití zejména v případě:

- atrofické rýmy (ztenčená nosní sliznice);
- infekční nebo alergické rýmy;
- používání léků, které poškozují epitel nosní sliznice;
- zánětu dutin (sinusitida);
- pobytu v znečištěném a prašném prostředí;
- vystavení extrémním teplotám;
- u starších pacientů;
- vysušené sliznice způsobené centrálním vytápěním nebo klimatizací;
- pobytu v zakouřeném prostředí.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nežádoucí účinky zdravotnického prostředku COLDISEPT nanoSILVER nosní sprej nejsou známy, přesto ale, zejména u citlivých osob, nelze vyloučit alergické příznaky. Pokud se alergická reakce objeví, musí být používání tohoto přípravku ukončeno.

Pokud si po použití tohoto přípravku všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků nebo neobvyklých pocitů, obraťte se na zdravotnického pracovníka a informujte o tom místního distributora, výrobce nebo příslušný národní zdravotní orgán:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

DALŠÍ INFORMACE A UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte přípravek, pokud jste alergický(-á) na jakoukoli jeho složku.

Nepoužívejte přípravek, pokud jste alergický(-á) na kovové stříbro.

Zabraňte kontaktu s očima. Ukončete používání přípravku při výskytu znepokojivých příznaků.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti!

V případě kontaminace vyjměte aplikátor, opláchněte jej a vyciňte nebo jej důkladně opláchněte vroucí vodou.

Těhotné ženy a děti do 6 let mohou přípravek používat pouze pod lékařským dohledem.

Přípravek může být používán dlouhodobě bez rizika návyku, nežádoucích účinků a komplikací.

POUŽITÍ A DÁVKOVÁNÍ

Přípravek používejte 3-4 x denně podle individuální potřeby.

Před prvním použitím stiskněte několikrát dávkovač.

Vložte aplikátor do nosní dutiny.

Aplikujte 1-2 dávky do každé nosní dírky.

UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, na suchém místě, mimo dosahu dětí.

Balení 20 ml

VÝZNAM SYMBOLŮ:

	Číslo šarže		Přečtěte si návod k použití		Výrobce
	Použitelné do		Datum výroby		Teplotní limity

Datum poslední revize textu: 1.9.2020

COLDISEPT

NANO SILVER

Nosový sprej

SK



NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Zdravotnícka pomôcka vo forme spreja potláča pocit suchej a podráždenej sliznice nosa a chráni ju pred škodlivými vonkajšími faktormi.

COLDISEPT nanoSILVER nosový sprej zvlhčuje a upokojuje nosovú sliznicu, podporuje jej regeneráciu a potláča pocit pálenia.

Prípravok obsahuje nanočastice striebra, ktoré potláčajú rast baktérií a plesní. Prípravok vytvára gélovú vrstvu, ktorá chráni pred baktériami a vírusmi a podporuje regeneráciu nosovej sliznice. Vlastnosti prípravku sú výsledkom pôsobenia minerálnych solí a rastlinného extraktu.

ZLOŽENIE

Čistená voda, nanočastice koloidného striebra, extrakt z riasy *Chondrus crispus* (írsky mach), sorbitol, glycerin, minerálne soli (dihydrogenfosforečnan draselný, chlorid draselný, chlorid sodný, chlorid vápenatý hexahydrát, chlorid horečnatý hexahydrát), benzoan sodný, kyselina citrónová.

POUŽITIE

Všetky prípady suchej a podráždenej nosovej sliznice, bez ohľadu na príčinu.

Použitie špeciálne v prípade:

- atrofickej nádchy (stenčená nosová sliznica);
- infekčnej alebo alergickej nádchy;
- používania liekov, ktoré poškodzujú epitel nosovej sliznice;
- zápalu dutín (sinusitída);
- pobytu v znečistenom a prašnom prostredí;
- vystavenia extrémnym teplotám;
- starších pacientov;
- vysušenej sliznice spôsobenej centrálnym vykurovaním alebo klimatizáciou;
- pobytu v zafajčenom prostredí.

VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Vedľajšie účinky zdravotníckej pomôcky COLDISEPT nanoSILVER nosový sprej nie sú známe, napriek tomu však, najmä u citlivých osôb, nie je možné vylúčiť alergické príznaky. V prípade, že sa objaví alergická reakcia, ukončíte používanie produktu.

Akákkoľvek závažná udalosť súvisiaca s touto zdravotníckou pomôckou musí byť nahlásená výrobcovi a príslušnému národnému orgánu.

Príslušný národný orgán pre zdravotnícku pomôcku v SR: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná ul. 11, SK-825 08, Bratislava 26.

ĎALŠIE INFORMÁCIE A UPOZORNENIA

Nepoužívajte prípravok, ak ste alergický na ktorúkoľvek jeho zložku.

Nepoužívajte prípravok, ak ste alergický na kovové striebro. Zabráňte kontaktu s očami.

Ukončíte používanie prípravku v prípade výskytu znepokojujúcich príznakov.

Nepoužívajte po uplynutí dátumu použiteľnosti!

V prípade kontaminácie vyberte aplikátor, opláchnite ho a vyvarťe alebo ho dôkladne opláchnite vriacou vodou.

Tehotné ženy a deti do 6 rokov môžu prípravok používať len pod lekárskej dohľadom.

Prípravok môže byť používaný dlhodobou bez rizika návyku, vedľajších účinkov a komplikácií.

POUŽITIE A DÁVKOVANIE

Prípravok používajte 3-4 x denne podľa individuálnej potreby.

Pred prvým použitím stlačte dávkovač niekoľkokrát.

Vložte aplikátor do nosovej dutiny.

Aplikujte 1-2 dávky do každej nosovej dierky.

UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 25 °C, na suchom mieste, mimo dosahu detí.

Balenie 20 ml

VÝZNAM SYMBOLOV:

	Číslo šarže		Pozri návod na použitie		Výrobca
	Použiteľné do		Dátum výroby		Horná hranica teploty

Dátum poslednej revízie textu: 1.9.2020