

COLDISEPT

CZ



NANO SILVER

Ušní kapky



NÁVOD K POUŽITÍ

Zdravotnický prostředek ve formě ušních kapek používaný k podpoře léčby zánětu zevního zvukovodu způsobeného bakteriální nebo plísňovou infekcí.

COLDISEPT nanoSILVER ušní kapky jsou určeny pro zevní používání ke změkčení a odstranění nečistot a pro vytvoření ochranné bariéry na povrchu pokožky. Přípravek obsahuje stříbrné a měděné nanočástice, které potlačují růst bakterií a plísní. COLDISEPT nanoSILVER ušní kapky napomáhají při léčbě zánětu zevního zvukovodu různé etiologie.

SLOŽENÍ

Čištěná voda, glycerin, propylenglykol, nanokoloid stříbra, nanokoloid mědi.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nežádoucí účinky zdravotnického prostředku COLDISEPT nanoSILVER ušní kapky nejsou známy, přesto ale, zejména u citlivých osob, nelze vyloučit alergické příznaky. Pokud se alergická reakce objeví, musí být používání tohoto přípravku ukončeno.

Pokud si po použití tohoto přípravku všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků nebo neobvyklých pocitů, obraťte se na zdravotnického pracovníka a informujte o tom místního distributora, výrobce nebo příslušný národní zdravotní orgán:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

DALŠÍ INFORMACE A UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte přípravek, pokud jste alergický(-á) na jakoukoli jeho složku.

Nepoužívejte přípravek, pokud máte perforovaný ušní bubínek.

Nevkládejte aplikátor příliš hluboko do ušního kanálku.

Zabraňte kontaktu s očima a ústy.

Ukončete používání přípravku při výskytu znepokojivých příznaků.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti!

Těhotné ženy a děti do 6 let mohou přípravek používat pouze pod lékařským dohledem.

POUŽITÍ A DÁVKOVÁNÍ

Používejte COLDISEPT nanoSILVER ušní kapky 3 x denně, a to ještě nejméně 3 dny po vymizení příznaků zánětu.

Mírně lahvičku zahřejte (nejlépe v ruce).

Lehněte si na bok, postiženým uchem nahoru.

Nakapejte do zvukovodu 5 kapek (pokud Vám lékař nedoporučil jinak) a zůstaňte v této pozici ještě alespoň 3-5 minut.

Používejte pravidelně podle individuálních potřeb.

UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, na suchém místě, mimo dosahu dětí.

Balení 15 ml

VÝZNAM SYMBOLŮ:

	Číslo šarže		Přečtěte si návod k použití		Výrobce
	Použitelné do		Datum výroby		Teplotní limity

Datum poslední revize textu: 1.9.2020

ARKONA Laboratorium
Farmakologii Stomatologicznej,
Nasutów 99C, 21-025 Niemce, Polsko

Vyrobeno v EU pro:
Alpen Pharma AG,
Bern, Švýcarsko



COLDISEPT

SK



NANO SILVER

Ušné kvapky



NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Zdravotnícka pomôcka vo forme ušných kvapiek používaná na podpornú liečbu zápalu vonkajšieho zvukovodu spôsobeného bakteriálnou alebo plesňovou infekciou. COLDISEPT nanoSILVER ušné kvapky sú určené na vonkajšie použitie k zmäkčeniu a odstráneniu nečistôt a k vytvoreniu ochranej bariéry na povrchu pokožky. Prípravok obsahuje nanočastice striebra a medi, ktoré potláčajú rast baktérií a plesní. COLDISEPT nanoSILVER ušné kvapky podporujú liečbu zápalu vonkajšieho zvukovodu rôzneho pôvodu.

ZLOŽENIE

Čistená voda, glycerín, propylénglykol, nanočastice koloidného striebra, nanočastice koloidnej medi.

VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Vedľajšie účinky zdravotníckej pomôcky COLDISEPT nanoSILVER ušné kvapky nie sú známe, napriek tomu však, najmä u citlivých osôb, nie je možné vylúčiť alergické príznaky. V prípade, že sa objaví alergická reakcia, ukončíte používanie produktu.

Akákoľvek závažná udalosť súvisiaca s touto zdravotníckou pomôckou musí byť nahlásená výrobcovi a príslušnému národnému orgánu.

Príslušný národný orgán pre zdravotnícke pomôcky v SR: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná ul. 11, SK-825 08, Bratislava 26.

ĎALŠIE INFORMÁCIE A UPOZORNENIA

Nepoužívajte prípravok, ak ste alergický na ktorúkoľvek jeho zložku.

Nepoužívajte prípravok, ak máte perforovaný ušný bubienok.

Neukladajte aplikátor príliš hlboko do ušného kanálika.

Zabráňte kontaktu s očami a ústami.

Ukončíte používanie prípravku v prípade výskytu znepokojujúcich príznakov.

Nepoužívajte po uplynutí dátumu použiteľnosti!

Tehotné ženy a deti do 6 rokov môžu prípravok používať len pod lekárskej dohľadom.

POUŽITIE A DÁVKOVANIE

Používajte COLDISEPT nanoSILVER ušné kvapky 3 x denne a po vymiznutí príznakov zápalu ešte najmenej 3 dni.

Fľaštičku mierne nahrejte (najlepšie v rukách).

Ľahnite si na bok, postihnutým uchom nahor.

Kvapkajte do zvukovodu 5 kvapiek (ak vám lekár neodporučil inak) a zostaňte v tejto pozícii ešte aspoň 3-5 minút.

Používajte pravidelne podľa individuálnych potrieb.

UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 25 °C, na suchom mieste, mimo dosahu detí.

Balenie 15 ml

VÝZNAM SYMBOLOV:

LOT	Číslo šarže	i	Pozri návod na používanie		Výrobca
	Použiteľné do		Dátum výroby	25 °C	Horná hranica teploty

Dátum poslednej revízie textu: 1.9.2020

ARKONA Laboratorium
Farmakologii Stomatologicznej,
Nasutow 99C, 21-025 Niemce, Poľsko

Vyrobené v EU pre:
Alpen Pharma AG,
Bern, Švajčiarsko

