

COLDISEPT

NANO SILVER

Orální sprej

CZ



NÁVOD K POUŽITÍ

Zdravotnický prostředek ve formě spreje pro podpůrnou léčbu zánětu v krku způsobeného bakteriální nebo plísňovou infekcí.

Zdravotnický prostředek COLDISEPT nanoSILVER orální sprej vytváří ochrannou bariéru na sliznici a tím ji chrání proti fyzikálním, chemickým a biologickým faktorům.

COLDISEPT nanoSILVER orální sprej pomáhá potlačit nepříjemné pocity v krku zvlhčením vysušené sliznice a tím výrazně tlumí příznaky zánětu jako bolest a pálení. Přípravek vytváří gelovou vrstvu, která chrání sliznici v ústech a krku před bakteriemi a viry.

Vodný roztok sodných, draselných, vápenatých a hořečnatých solí obsažený v přípravku čistí hrdlo, snižuje otok sliznice v krku a nosu a podporuje regeneraci podrážděných sliznic.

Přípravek obsahuje stříbrné nanočástice, které omezují růst bakterií. Silice máty peprné pomáhá čistit nosní dutinu, tlumí kašel a zlepšuje dýchání.

SLOŽENÍ

Čistěná voda, nanokoloid stříbra, extrakt z *Chondrus crispus* (puchratka kadeřavá), sorbitol, glycerin, minerální soli (dihydrogenfosforečnan draselný, chlorid draselný, chlorid sodný, hexahydrát chloridu vápenatého, hexahydrát chloridu hořečnatého), silice máty peprné, benzoan sodný, kyselina citronová.

INDIKACE

COLDISEPT nanoSILVER orální sprej účinně podporuje léčbu:

- zánětu sliznic v ústech a krku;
- zánětu mandlí;
- stavu po vyjmutí mandlí.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nežádoucí účinky zdravotnického prostředku COLDISEPT nanoSILVER orální sprej nejsou známy, přesto ale, zejména u citlivých osob, nelze vyloučit alergické příznaky. Pokud se alergická reakce objeví, musí být používání tohoto přípravku ukončeno.

Pokud si po použití tohoto přípravku všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků nebo neobvyklých pocitů, obraťte se na zdravotnického pracovníka a informujte o tom místního distributora, výrobce nebo příslušný národní zdravotní orgán:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

DALŠÍ INFORMACE A UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte přípravek, pokud jste alergický(-á) na jakoukoli jeho složku.

Nepoužívejte přípravek, pokud jste alergický(-á) na kovové stříbro.

Zabraňte kontaktu s očima.

Ukončete používání přípravku při výskytu znepokojivých příznaků.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti!

Těhotné ženy a děti do 6 let mohou přípravek používat pouze pod lékařským dohledem.

Přípravek může být používán dlouhodobě bez rizika návyku, nežádoucích účinků a komplikací.

POUŽITÍ A DÁVKOVÁNÍ

Přípravek používejte 3-4 x denně podle individuální potřeby.

Před prvním použitím stiskněte několikrát dávkovač.

Vložte aplikátor co nehlouběji do úst a nasměrujte jej do krku.

Aplikujte 3-4 dávky (stisky aplikátoru).

UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, na suchém místě, mimo dosahu dětí.

Balení 20 ml

VÝZNAM SYMBOLŮ:

	Číslo šarže		Přečtěte si návod k použití		Výrobce
	Použitelné do		Datum výroby		Teplotní limity

Datum poslední revize textu: 1.9.2020

COLDISEPT

NANO SILVER

Ústny sprej

SK



NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Zdravotnícka pomôcka vo forme spreja na podpornú liečbu zápalu hrdla spôsobeného bakteriálnou alebo plesňovou infekciou.

Zdravotnícka pomôcka COLDISEPT nanoSILVER ústny sprej vytvára ochrannú bariéru na sliznici, a tým ju chráni pred fyzikálnymi, chemickými a biologickými faktormi.

COLDISEPT nanoSILVER ústny sprej pomáha potláčať nepríjemné pocity v krku zvlhčením vysušenej sliznice, a tým výrazne tlmi príznaky zápalu ako sú bolesť a pálenie. Prípravok vytvára gélovú vrstvu, ktorá chráni sliznicu v ústach a krku pred baktériami a vírusmi.

Vodný roztok sodných, draselných, vápenatých a horečnatých solí obsiahnutých v prípravku čistí hrdlo, znižuje opuch sliznice v krku a v nose a podporuje regeneráciu podráždených slizníc.

Prípravok obsahuje nanočastice striebra, ktoré potláčajú rast baktérií. Silica z máty priepornej pomáha čistiť nosovú dutinu, tlmi kašeľ a zlepšuje dýchanie.

ZLOŽENIE

Čistená voda, nanočastice koloidného striebra, extrakt z riasy *Chondrus crispus* (Irsky mach), sorbitol, glycerín, minerálne soli (dihydrogenfosforečnan draselný, chlorid draselný, chlorid sodný, chlorid vápenatý hexahydrát, chlorid horečnatý hexahydrát), silica z máty priepornej, benzoan sodný, kyselina citrónová.

POUŽITIE

COLDISEPT nanoSILVER ústny sprej účinne podporuje liečbu:

- zápalu slizníc v ústnej dutine a krku;
- zápalu mandlí;
- stavu po vybratí mandlí.

VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Vedľajšie účinky zdravotníckej pomôcky COLDISEPT nanoSILVER ústny sprej nie sú známe, napriek tomu však, najmä u citlivých osôb, nie je možné vylúčiť alergické príznaky. V prípade, že sa objavia alergická reakcia, ukončite používanie prípravku.

Akákolvek závažná udalosť súvisiaca s touto zdravotníckou pomôckou musí byť nahlásená výrobcovi a príslušnému národnému orgánu.

Príslušný národný orgán pre zdravotnícke pomôcky v SR: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná ul. 11, SK-825 08, Bratislava 26.

ĎALŠIE INFORMÁCIE A UPOZORNENIA

Nepoužívajte prípravok, ak ste alergický na ktorúkoľvek jeho zložku.

Nepoužívajte prípravok, ak ste alergický na kovové striebro.

Zabráňte kontaktu s očami.

Ukončite používanie prípravku v prípade výskytu znepokojujúcich príznakov.

Nepoužívajte po uplynutí dátumu použiteľnosti!

Tehotné ženy a deti do 6 rokov môžu prípravok používať len pod lekárskej dohľadom.

Prípravok môže byť používaný dlhodobo bez rizika návyku, vedľajších účinkov a komplikácií.

POUŽITIE A DÁVKOVANIE

Prípravok používajte 3-4 x denne podľa individuálnej potreby.

Pred prvým použitím stlačte dávkovač niekoľkokrát.

Vložte aplikátor čo najhlbšie do úst a nasmerujte ho do krku.

Aplikujte 3-4 dávky (stlačením aplikátora).

UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 25 °C, na suchom mieste, mimo dosahu detí.

Balenie 20 ml

VÝZNAM SYMBOLOV:

	Číslo šarže		Pozri návod na použitie		Výrobca
	Použiteľné do		Dátum výroby		Horná hranica teploty

Dátum poslednej revízie textu: 1.9.2020